

## Die Revolution in der Medikamenteneinnahme

Die Idee für den **MEDI-BECH** ist im Jahr 2014 aus einer privaten Notsituation entstanden und bis heute gereift. Eine Familienangehörige im Alter von 90 Jahren hatte massive Probleme bei der Einnahme von Tabletten. Nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt hat der Entwickler erfahren, dass die Schluckreflexe bei älteren Menschen nachlassen und sich dadurch das Einnehmen von Medikamenten erschwert. Nach langen Recherchen und vielen Nachfragen in Apotheken, konnte keine moderate Hilfe für das Problem gefunden werden.

Dies hat den Entwickler dazu veranlasst selbst tätig zu werden und ein Hilfsinstrument zur Medikamenteneinnahme zu entwickeln. Nach vielen Handzeichnungen und Computerentwürfen, konnte eine Form gefunden werden, die sich für die Einnahme besonders gut eignet. Anfang 2015 wurden im 3D-Drucker die ersten Muster erstellt und schließlich konnte Anfang 2018 mit der Serienproduktion begonnen werden.

Im August 2015 wurde der **MEDI-BECH** zum Patent angemeldet. Ab 2018 bieten wir den **MEDI-BECH** zum Verkauf an. Unsere Prämisse ist es, alle Menschen zu unterstützen, die Hilfe bei der Einnahme von Medikamenten benötigen.

Mit dem patentierten Medi-Bech werden Tabletten, Kapseln oder Pulver durch ein Getränk direkt in den Rachenraum „gespült“. So können diese weder an der Zunge noch am Gaumen haften bleiben, somit wird ein Würgereiz vermieden.

Zugleich stellt der Medi-Bech sicher, dass das Medikament vollständig und mit ausreichend Flüssigkeit eingenommen wird.

Das Medi-Bech-Set besteht aus:  
Trinkbecher, Deckel und Medi-Bech-Spange

Bestehend aus Polypropylen  
Frei von Weichmachern  
Recyclbar  
Spülmaschinengeeignet  
Füllmenge: 250 ml

Exklusiver Vertrieb durch



choice4you

choice4you GmbH

Krefelder Str. 3  
D-47506 Neukirchen-Vluyn

info@choice4you.de  
www.choice4you.de



EAN: 4270000147999 · PZN: 15375119 · PPN: 111537511981



GEBRAUCHSANWEISUNG

# MEDI • BECH

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Reinigen Sie vor dem Erstgebrauch das komplette Set (Spülmaschine oder per Hand), um evtl. Kunststoffreste und Verunreinigungen zu entfernen. Nach der Reinigung können Sie Ihren MEDI-BECH wie folgt verwenden.

### SCHRITT 1



Schieben Sie die Spange in die Einschuböffnung. Die Spange kann nur in einer Position in den Deckel eingeführt werden. Beachten Sie, dass die Spange bis zum Anschlag eingesetzt ist, damit keine Flüssigkeit zwischen Spange und Becher durchfließen kann.

### SCHRITT 2



Befüllen Sie den Becher mit ausreichend Flüssigkeit. 250 ml erreichen Sie durch das Befüllen bis zum unteren Rand (siehe Eichstrich).

### SCHRITT 3



Setzen Sie den Deckel des Medi-Bechs auf den Becher auf: Drücken Sie den Deckel auf, bis ein leichtes Knacken zu hören ist. Erst nach dem kompl. Einrasten kann gewährleistet werden, dass der Deckel abdichtet.

### SCHRITT 4



Legen Sie das Medikament in das Tablettenfach: Jetzt ist Ihr Medi Bech zur Einnahme bereit.

### SCHRITT 5



Setzen Sie den oberen Rand des Deckels am Mund an und spülen Sie die Tablette mit der Flüssigkeit ein. Das Prinzip des Einspülvorganges wird durch die schematische Darstellung links erklärt.

## WEITERE VORTEILE DES MEDI-BECH SIND:

- die Einnahme von Medikamenten ist liegend möglich
- die Einnahme der Medikamente kann durch Pflegepersonal vorbereitet werden
- das großzügige Fassungsvermögen des Bechers (250 ml) ermöglicht die Zuführung von ausreichend Flüssigkeit im Zuge der Einnahme
- die Einnahme der kompletten Menge des Medikamentes wird sichergestellt, da kein Zerkleinern von Tabletten mehr nötig ist
- vereinfachte Verabreichung von Medikamenten auch bei Kindern
- das Haftenbleiben des Medikamentes an der Zunge oder im Gaumenbereich ist nahezu ausgeschlossen
- das leichte Eigengewicht des Medi-Bechs ermöglicht eine unproblematische Handhabung (auch für ältere Menschen mit wenig Kraft) und Kindern
- Achtung: bei Schluckbeschwerden (Dysphagie) sollten Sie unbedingt vor Gebrauch Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt halten

## VOR DEM ERSTGEBRAUCH REINIGEN!

### ACHTUNG

Zur Einnahme weiterer Medikamente und zu Ihrer persönlichen Sicherheit nehmen Sie die Spange kurz heraus und trocknen Sie diese ab. (Zeigt ob das Medikament eingespült wurde und stellt sicher, dass ein Verkleben von weiteren Medikamenten verhindert wird)

### ACHTUNG

Zum Abziehen des Deckels nehmen Sie mit dem Daumen die Spange und ziehen ihn vom Becher.

Weitere Informationen und Videos finden Sie unter:  
[WWW.MEDI-BECH.DE](http://WWW.MEDI-BECH.DE)

